

MASCARILLA HIGIÉNICA REUTILIZABLE XR2/3


UNE 0065:2020 / UNE-EN14683
PRODUCTO FABRICADO EN ESPAÑA

Descripción

Mascarilla higiénica reutilizable conforme a la norma UNE0065:2020 Y UNE-EN14683, fabricada con material 100% PES. Sujeción a las orejas mediante dos bandas elásticas. Reduce el riesgo de contaminación e infección.

Características

- Talla recomendada para uso en adulto.
- Material: 100% PES.
- Sujeción a las orejas mediante dos bandas elásticas.

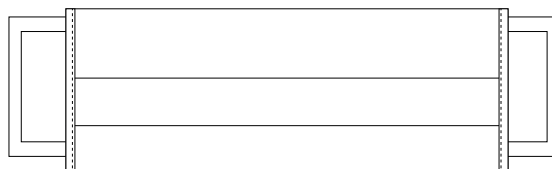

Aprobaciones

- Cumple todo lo que especifica la nueva norma UNE 0065:2020 referente a mascarillas higiénicas reutilizables.
- Cumple la Directiva Europea de productos sanitarios CEE/93/42.
- Eficacia en la filtración de aerosoles: > 95%
- Eficacia de filtración de partículas: > 94%
- UNE-EN149 Filtración de partículas de 0.3 micras de diámetro y mayores, equivalente a una eficacia de filtración de al menos 95%.
- UNE-EN ISO-05 Solidez al color: 4,5 (máx 5).
- UNE-EN ISO 12945-2 Resistencia al peeling: 5 (máx 5).
- Transpirabilidad: < 60 Pa/cm2 según normativa AST1 conforme a UNE-EN-14683.
- Compatibilidad con la piel: Todas las zonas que entren en contacto con la piel del portador no provocan irritación ni cualquier efecto adverso para la salud.
- Cumple cuanto determina la norma sobre resistencia a la penetración microbiana - en seco.
- Cumple cuanto determina la norma sobre resistencia a la penetración microbiana - en húmedo.
- Su resistencia a la penetración de líquidos y bacterias, cumple cuanto determina la normativa EN-13795.
- Resistente a la abrasión, rotura y tensión según norma EN-13795.
- Libre de colorantes alérgicos conforme Oeko-Tex II.

Lavado de la mascarilla

- No utilizar lejía, podría afectar a las características del tejido.
- Utilizar nivel de agua alto en lavado.
- Temperatura de lavado: 60°C.
- Utilizar detergente humectante.
- pH: ligeramente alcalino, no superior a pH 9.
- Planchado máximo a 140° de 10 - 15 segundos.
- Puede utilizarse secadora.
- Tanto durante el secado, como en el almacenaje posterior de la mascarilla, se deben evitar los ambientes en los que la mascarilla se pueda volver a contaminar.
- Después de cada ciclo de lavado, se debe realizar una inspección visual (con guantes de protección o manos lavadas). Si se detecta algún daño en la mascarilla (menor ajuste, deformación, desgaste, etc.), se debe desechar la mascarilla.

// Colocación de la mascarilla

Se recomienda colocar la mascarilla sobre la piel desnuda y respetar los siguientes pasos:



1. Lavarse las manos con agua y jabón o frotarlas con gel hidroalcohólico antes de manipular la mascarilla.



2. Colocar la mascarilla en la cara.



3. Sostener la mascarilla desde el exterior y pasar el arnés a ambos lados de las orejas, sin cruzarlos.



4. Bajar la parte inferior de la mascarilla a la barbilla. Verificar que la mascarilla cubre la barbilla.



Una vez ajustada, no tocar la mascarilla con las manos. Si se necesita tocar la mascarilla, debe previamente lavarse las manos con agua y jabón o frotárselas con gel hidroalcohólico.

// Mantenimiento de la mascarilla



// Eliminación de la mascarilla

Para reducir los riesgos del uso de estas mascarillas se debe eliminar una vez superado el número recomendado de **25 ciclos** de lavado.

// Procedimiento para la eliminación

Las mascarillas se deben desechar en un contenedor provisto de una bolsa de plástico (preferiblemente con tapa y control no manual). Se recomienda utilizar doble bolsa para preservar el contenido de la primera bolsa en caso de desgarrar de la bolsa exterior.

// Retirada de la mascarilla

Para evitar la contaminación al retirar una mascarilla, se deben seguir los siguientes pasos:

1. Quitarse los guantes de protección.
2. Lavarse las manos con agua y jabón o frotarlas con una solución hidroalcohólica.
3. Retirar la mascarilla sin tocar la parte frontal de la mascarilla.
4. Lavarse las manos con agua y jabón o frotarlas con una solución hidroalcohólica.

// Advertencias

Este dispositivo no es un Equipo de Protección Individual (EPI) en el sentido del Reglamento UE/2016/425.

El uso de la mascarilla no exime de la aplicación de gestos barrera complementados por las medidas de distanciamiento social recomendadas por el Ministerio de Sanidad, en relación con COVID-19.