

## EFICACIA VIRUCIDA DE **OX-VIRIN® Presto al uso** EN EL CONTEXTO DE COVID-19



**OX-VIRIN® Presto al Uso** cumple la Norma UNE 14476 que acredita la eficacia del producto frente a las cepas víricas de referencia. Así mismo, se ha demostrado la eficacia de **OX-VIRIN® Presto al Uso** en laboratorio externo acreditado frente a **CORONAVIRUS**, en un **tiempo de contacto de tan solo 1 minuto**, cumpliendo con el anexo específico de la Norma UNE EN 14476: 2013 + A2: 2019.

A continuación, se adjunta imagen de la conclusión final del informe emitido por el laboratorio externo acreditado donde se informa de dichos resultados:

### 10. Conclusión

El producto desinfectante **OX-VIRIN PRESTO AL USO**, lote OX20VIM045, en condiciones limpias (0,3 g/L seroalbúmina bovina) y con un tiempo de contacto de 1 minutos, a la concentración de **80%**, solicitada por el cliente, **posee** actividad virucida frente a Coronavirus 229E (ATCC VR-740), cuando se evalúa la actividad de acuerdo con el procedimiento interno DESIN-6225 basado en la norma **NF EN 14476: 2013 + A2: 2019**.

Bétera (Valencia) a, 14 de agosto de 2020

Fdo. Ruth Novella.  
Técnico responsable  
(Investigador)

### Revisión Garantía de Calidad:

La realización del ensayo y los resultados obtenidos ha sido supervisada por la Directora del Estudio.

La Directora Garante de Calidad ha inspeccionado la realización del ensayo comprobando que se realiza con el procedimiento y materiales/reactivos adecuados y con equipos calibrados, cumpliendo las especificaciones de Buenas Prácticas de Laboratorio (BPLs), y el informe final refleja fielmente los datos primarios.

Fdo. Noelia Ros  
Responsable de área  
(Directora de estudio)

Fdo. Encarnación Esteban  
Director técnico  
(Directora Garante de Calidad)



### Referencia:

- NF EN 14476: 2013 + A2: 2019. Ensayo cuantitativo de suspensión para la evaluación de la actividad virucida en Medicina. Método de ensayo y requisitos (Fase 2/Etapa 1). AFNOR.

Además, de acuerdo con las directrices de la Norma UNE EN 14476, el producto **OX-VIRIN® Presto al Uso** también ha demostrado eficacia virucida general y eficacia frente a otro tipo de virus adicionales tales como el Virus Influenza A H1N1.

Finalmente, es interesante recalcar que de manera adicional a su eficacia virucida, el producto también se considera **bactericida y fungicida**, debido a que está acreditado el cumplimiento de las Normas de eficacia Europeas UNE EN: 1276, 1650, 1656, 1657 y 13697.

Por otro lado, cabe señalar que el producto **OX-VIRIN® Presto al Uso** está incluido en el listado de productos virucidas elaborado por el Ministerio de Sanidad (Gobierno de España) para luchar frente al CORONAVIRUS SARS-CoV-2.



OX-VIRIN PRESTO AL USO	15-20/40/90-07783	Peróxido de hidrogeno: 0.2%, Acido peracético: 0.05%	-Público en general	• Desinfección de contacto: Superficies y equipos mediante pulverización con el producto puro.	Nacional
			-Personal profesional	• Desinfección de contacto: Superficies y equipos mediante pulverización con el producto puro.	
			-Personal profesional especializado	• Desinfección aérea: Pulverización o nebulización con el producto puro.	

Teniendo en cuenta todo lo anterior, que se suma a otras cualidades diferenciadoras del producto tales como su 100% biodegradabilidad, no toxicidad, registro de uso por el público en general y respeto por los materiales, **OX-VIRIN® Presto al Uso** se posiciona como el producto desinfectante de elección para hacer frente a la actual pandemia por Coronavirus.



- Desinfectante de alto nivel eficaz frente a virus con envoltura (CORONAVIRUS) de acuerdo a Norma Europea UNE EN 14476.
- Producto presto al uso certificado para la desinfección de superficies, utensilios, equipos y materiales.
- 100% Biodegradable.
- No corrosivo. Respetuoso con los materiales. No daña los tejidos ni los colores.
- Producto incluido en el listado emitido por el Ministerio de Sanidad (Gobierno de España) de desinfectantes recomendados para la lucha frente a COVID-19.

