

# DS 100 RAPID

DESINFECTANTE DE SUPERFICIES DE ÁMBITO SANITARIO

Información sobre el producto  
FICHA TÉCNICA

## PROPIEDADES:

Preparado listo para su uso, para la desinfección rápida de superficies de ámbito sanitario compatibles con alcoholes, como suelos, paredes, puertas, lavabos, bañeras, duchas, etc. Evitar materiales sensibles al alcohol. Amplio espectro de acción: bactericida, levuricida, fungicida y virucida. Comprobado según las normas europeas actuales. Comprobado mediante ensayo según las normas UNE EN-13727, EN-13624 y EN-14476.

Propiedades microbiológicas (20 °C, disolución 80% RTU):

Eficacia	Norma	Tiempo de contacto	Organismos
Bactericida	UNE-EN 13727	1 min	Pseudomonas aeruginosa Staphylococcus aureus Enterococcus hirae
Fungicida	UNE-EN 13624	5 min	Candida albicans Aspergillus brasiliensis
Levuricida	UNE-EN 13624	1 min	Candida albicans
Virucida limitado	UNE-EN 14476	1 min	Adenovirus tipo 5 Norovirus murino Rotavirus Virus con envoltura

## MODO DE EMPLEO Y DOSIS:

A fin de evitar riesgos para las personas y el medio ambiente, siga las instrucciones de uso. Deberá desecharse correctamente, evitando la liberación al medio ambiente. Pulverizar el producto directamente a una distancia de 30 cm sobre la superficie a desinfectar en una dosis recomendada de 8 pulverizaciones (10 ml)/m<sup>2</sup>, asegurándose de obtener una película uniforme. Dejar actuar a temperatura ambiente durante 5 minutos. Retirar posteriormente el material usando una mopa o bayeta aséptica para secar. No necesita aclarado. Conservar únicamente en el recipiente original. Pulverizar mediante el uso de instrumental adecuado. Comprobar compatibilidad de superficies sensibles, en una zona no visible. Se requiere limpieza previa: mediante arrastre húmedo, retirar los residuos de las zonas a tratar, antes de proceder a la desinfección de la superficie. En recintos desinfectados, ventilar adecuadamente. No entrar en el recinto desinfectado hasta transcurridas 3 horas.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Aspecto: líquido  
Color: incoloro  
Olor: perfumado  
Densidad relativa a 20 °C: 0,926  
pH solución: 10 ± 1  
Composición: propan-2-ol 31 g., etanol 19 g.,  
cloruro de bencil C12-C14 alquildimetilamonio 0,256 g.,  
perfume 0.04 g., agua C.S.P. 100 g.

## PRESENTACIÓN:

750 mL y 5 L.



AVDA. MANOTERAS NUM.24 PLANTA 2  
28050 MADRID T. 984016644  
Licencia de Fabricación de Biocidas N° Reg. AEMPS: 13273-DS

REF	EXP000
Versión/fecha	1-01/04/2023
Idioma	ESP
pagina	1/2
GMN	8437025784EXP000CA

## CONDICIONES DE CONSERVACIÓN:

Temperatura recomendada de conservación:



**Evitar fuentes de calor, radiación, electricidad estática y el contacto con alimentos.**

## REGISTROS:

Fabricado en la UE (ESPAÑA)

UFI: W300-E002-S00X-G5RU

Nº Reg. AEMPS: 1383-DES

## VIDA ÚTIL:

2 años

12 meses desde apertura de envase

## ACREDITACIONES:



## IMPACTO AMBIENTAL:

DS100 RAPID es un producto fácilmente biodegradable. El embalaje de polietileno y polipropileno se puede destinar a la producción de energía o reciclarse. La Ficha de datos de seguridad contiene las instrucciones de eliminación.

## ADVERTENCIA DE SEGURIDAD:

DS100 RAPID está clasificado y etiquetado según reglamento CLP, ver etiquetado y fichas de datos de seguridad del producto.

Información orientativa con fines comerciales. Producto exclusivamente profesional. Atenerse a las indicaciones de la etiqueta y ficha de datos de seguridad para el manejo y empleo del producto. Contactar con nuestro departamento técnico para resolver posibles dudas.



AVDA. MANOTERAS NUM.24 PLANTA 2  
28050 MADRID t. 984016644

Licencia de Fabricación de Biocidas Nº Reg. AEMPS: 13273-DS

REF	EXP000
Versión/fecha	1-01/04/2023
Idioma	ESP
pagina	2/2
GMN	8437025784EXP000CA