

CanalPro™ Jeni

Paso a paso



 **COLTENE**



1 Conecte la unidad básica a la red eléctrica (↓). Compruebe si la tarjeta SD está colocada en su ranura (↑) en la parte posterior de la unidad básica.





2 Conecte el contraángulo (conexión eléctrica ISO) al motor (no debe girarse).



3a Conecte el motor a la unidad (→).



4 Coloque el pedal inalámbrico en el suelo dentro de la distancia de trabajo de la unidad básica.

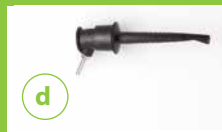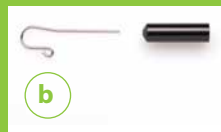

5 Monte el set del localizador de ápice (a, b, c, d, e) y conéctelo en la unidad básica (←).



6 Encienda la unidad básica (botón On/Off →).

El set de cables del localizador de ápice consta de:

- a) Cable de medición con conexión
- b) Clip labial
- c) Soporte de conexión (para uso higiénico del clip labial)
- d) Cable para el clip de la lima (si corresponde)
- e) Clip de la lima (si corresponde)



a

Pulse aquí para configurar su idioma y ajustar el volumen de las señales acústicas.



b

Se pueden mostrar más limas por secuencia en el menú de configuración del sistema de limas.

Para usar únicamente el localizador de ápice, pulse la imagen del ápice. Para la preparación, pulse sobre la imagen de preparación.

Pulse sobre la imagen de preparación y elija un juego de limas. También puede personalizar uno propio en el modo Doctor's Choice.



c

Configure la longitud de trabajo tocando la barra correspondiente del conducto representado.

d

Pulse aquí para apagar el localizador de ápice.




e

Pulse aquí para calibrar el motor. Debe calibrar el motor cada vez que cambie el contraángulo.

Pulse aquí también para cambiar los ajustes del ápice (volumen, sonido, detención al ápice).

Configure aquí sus ajustes individuales de sonido, volumen y detención al ápice.

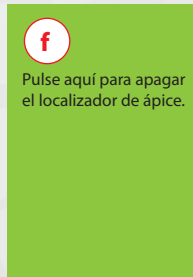

Antes de empezar la endodoncia, seleccione la lima que necesita y ajuste el clip labial.

Active el motor pisando el pedal.



El CanalPro™ Jeni se adapta constantemente a la anatomía de cada conducto radicular y regula de forma continua el movimiento rotativo, el torque y el estrés de la lima.

Introduzca la lima en el conducto hasta encontrar resistencia y ejercer una ligera presión constante, sin necesidad de aplicar técnicas de picoteo o pincelado. Mantenga la presión hasta oír una tonalidad de aviso, que indica que debe irrigar el conducto. Saque la lima del conducto limpiela, e irrigue. A continuación, proceda con la preparación como se indica anteriormente. Cuando oiga varios tonos breves, será necesario pasar a otra lima.