

# GUÍA DE POLVOS AIRFLOW®

► EMS es la única empresa que fabrica sus propios polvos en dos laboratorios químicos en Alemania y Suiza. Con más de 35 años de investigación, ensayos clínicos, estudios científicos y millones de pacientes tratados, EMS recomienda los siguientes 2 polvos para el 100% de los casos clínicos.

## RECOMENDADOS



## OTRO POLVO DE EMS

Nombre	PLUS	COMFORT	SOFT	PERIO
Ref	DV-082	DV-048	DV-071	DV-070
Sabor	NEUTRO	LIMÓN MENTA CEREZA	NEUTRO	NEUTRO
Composición	ERITRITOL	BICARBONATO DE SODIO	GLICINA	GLICINA
Tamaño de partícula	~14µm	~40µm	~65µm	~25µm
pH	~7	~8.1	~6	~6
Diente	Manchas y cálculo blando	✓	✓	✗
	Esmalte	✓	✓	✓
	Manchas blancas del esmalte	✓	✗	✗
	Fosas y fisuras	✓	✗	✗
	Dentina	✓	✗	✗
Tejidos blandos	Encía	✓	✗	✓
	Lengua y paladar	✓	✗	✓
Restauraciones	Composite híbrido	✓	✗	✓
	Ionómero de vidrio	✓	✗	✗
Implantes	y tejidos periimplantarios	✓	✗	✓
Ortodoncia	Brackets y aparatos	✓	✗	✓



Tenga cuidado con los polvos que se venden como «compatibles» con EMS, ya que pueden dañar los tejidos bucales y el equipo. Aquí se ve una tobera completamente dañada por estos agresivos polvos.

- Utilice solo polvos EMS con sus equipos EMS.
- El uso de polvos no autorizados por EMS dará lugar a la pérdida de la garantía.

