

> PREPARACIÓN:

Cada pieza de mano dental debe limpiarse, desinfectarse, lubricarse y esterilizarse inmediatamente después de cada tratamiento. Si no se realiza este mantenimiento las piezas de mano dental pueden obstruirse, sobrecalentarse y causar daños a la pieza o al paciente.

> LIMPIEZA:

Inmediatamente finalizado el tratamiento, extraiga la fresa y a continuación haga funcionar la pieza dental en el aire 1 ó 2 min para eliminar los restos de la intervención.

Limpieza Externa: Limpie la pieza dental con agua corriente hasta que haya eliminado todo resto de suciedad y residuos.

Limpieza Interna: Limpie el interior de la pieza dental utilizando sprays aprobados para limpieza.

> DESINFECCIÓN:

Desinfección Externa: Desinfecte la pieza dental con un desinfectante aprobado de paño o solución hasta que haya eliminado todo resto de residuos.

Desinfección Interna: Limpie el interior de la pieza dental utilizando sprays aprobados para desinfección.

> LUBRICACIÓN:

La lubricación es una parte crítica del proceso, lubricar con un spray aprobado para lubricación. Pulverice el spray en la parte inferior del instrumento por 5 segundos o hasta que el lubricante salga por el cabezal.

Si el lubricante no sale limpio repita el proceso. Posteriormente pulverice también el cabezal de la pieza dental.

> EMPAQUETADO:

Introduzca la pieza dental individualmente en una bolsa de esterilización.

> ESTERILIZACIÓN:

Esterilizar las piezas dentales en Autoclaves clase B (con bomba de vacío) a 134°C.

> ALMACENAMIENTO:

Luego de esterilizar la pieza dental, guardar y almacenar en la bolsa en un lugar seco hasta su uso.

