



GUÍA DE MANTENIMIENTO PARA INSTRUMENTAL ROTATORIO

Preparación: Cada pieza de mano dental debe limpiarse, desinfectarse, lubricarse y esterilizarse inmediatamente después de cada tratamiento. Si no se realiza este mantenimiento las piezas de mano dental pueden obstruirse, sobrecalentarse y causar daños a la pieza o al paciente.

Limpieza: Inmediatamente finalizado el tratamiento, extraiga la fresa y a continuación haga funcionar la pieza dental en el aire 1 ó 2 min para eliminar los restos de la intervención.

Limpieza Externa: Limpie la pieza dental con agua corriente hasta que haya eliminado todo resto de suciedad y residuos.

Limpieza interna: Limpie el interior de la pieza dental utilizando sprays aprobados para limpieza.

Desinfección

Desinfección Externa: Desinfecte la pieza dental con un desinfectante aprobado de paño o solución hasta que haya eliminado todo resto de residuos.

Desinfección interna: Limpie el interior de la pieza dental utilizando sprays aprobados para desinfección.

Lubricación: La lubricación es una parte crítica del proceso, lubricar con un spray aprobado para lubricación. Pulverice el spray en la parte inferior del instrumento por 5 segundos o hasta que el lubricante salga por el cabezal. Si el lubricante no sale limpio repita el proceso. Posteriormente pulverice también el cabezal de la pieza dental

Empaquetado: Introduzca la pieza dental individualmente en una bolsa de esterilización.

Esterilización: Esterilizar las piezas dentales en Autoclaves clase B (con bomba de vacío) a 134°C

Almacenamiento: Luego de esterilizar la pieza dental, guardar y almacenar en la bolsa en un lugar seco hasta su uso.

NEXO