

PREMIUM WHITENING

CAVEX BITE & WHITE ABC MASTERKIT

ACTIVAR - BLANQUEAR - ACONDICIONAR

Tratamientos de blanqueamiento
seguros, efectivos e indoloros
bajo su supervisión.



**YOUR
IMPRESSION
IS OUR
SPECIALTY**

CAVEX

PREMIUM WHITENING

CAVEX BITE&WHITE ABC MASTERKIT

¿Busca su paciente un resultado de blanqueamiento duradero y completo con mínima sensibilidad? Entonces elija el ABC Masterkit: El tratamiento de blanqueamiento más efectivo y completo.

¿Cómo funciona?

A

ACTIVAR con Cavex Bite&White StainLess (2-3 minutos).

Los dientes deben cepillarse con la pasta para limpiar la superficie del diente a fondo, de modo que el gel blanqueador entre en contacto directo con el esmalte dental. StainLess aumenta, además, el valor del pH en la boca, haciendo que el tratamiento de blanqueamiento sea aún más eficaz.

B

BLANQUEAR con gel Cavex Bite&White (30-60 minutos).

El gel blanqueador, aplicado en una cubeta, contiene peróxido de carbamida al 16 % que equivale a peróxido de hidrógeno al 6 %. El fluoruro de sodio añadido refuerza el esmalte y el nitrato de potasio minimiza cualquier sensibilidad.




C

ACONDICIONAR con Cavex Bite&White ExSense (5-10 minutos).

El gel se puede aplicar en la misma cubeta y contiene una composición única de hidroxiapatita y un sol hidrodispersante. Este sella los túbulos y microfisuras en el esmalte, minimizando la sensibilidad. ExSense contribuye, además, a la remineralización y recupera la microdureza de los dientes.

Más información

Escanee el código QR para ver el vídeo con más información.

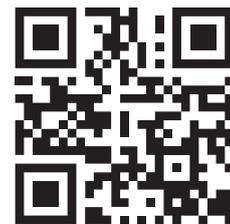

ACTIVAR - BLANQUEAR - ACONDICIONAR

YOUR IMPRESSION IS OUR SPECIALTY

CAVEX

Fustweg 5 | 2031 CJ Haarlem | Los países bajos | cavex.nl

ZYBW09001ES.00