


Nosotros

Mascarillas Madrid

DADA UNIVERSAL SL. es una empresa madrileña con mucha experiencia en Importación, exportación e implantación de proyectos en el mundo de hostelería. Debido al panorama actual, hemos sentido la necesidad de contribuir a la contención de la pandemia poniendo a disposición todos nuestros recursos para fabricar mascarillas al servicio de la gente al mejor relación precio-calidad.

MASCARILLAS MADRID, nace de la mano de la empresa **DADA UNIVERSAL S.L**, nuestro equipo humano ha sido capaz de llevar a cabo un proceso de adaptación y agilidad funcional. Hemos asumido de forma diligente y exitosa el reto que supone transformar nuestro producto final para cubrir una necesidad apremiante en esta excepcional crisis sanitaria .

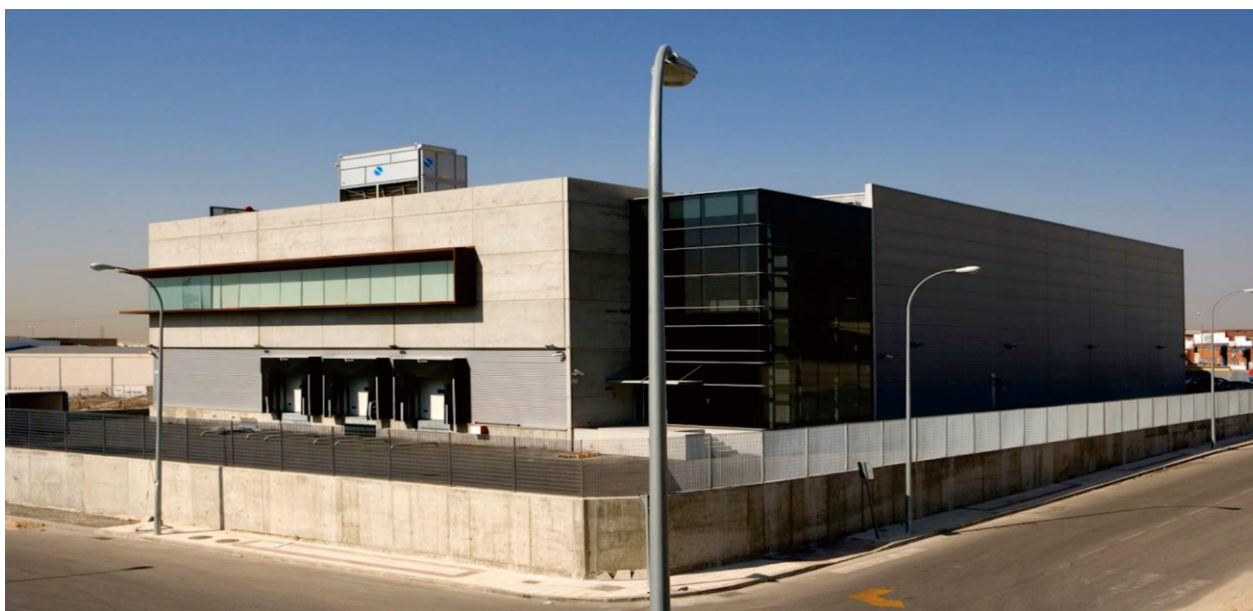

LA FÁBRICA EN HUMANES DE MADRID, ESPAÑA



SALA DE FABRICACIÓN DE MASCARILLAS

Ficha Técnica

Mascarillas desechables tres capas

Descripción

Mascarilla rectangular con pliegues de tejido sin tejer en tres capas. Ajuste anatómico a distintos tamaños y características faciales, con tira moldeable en borde superior.



Características principales

- No desprende partículas y es resistente a la humedad del flujo del aire respiratorio.
- Exenta de látex, fibra de vidrio y de sustancias tóxicas o irritantes.
- Sistema de sujeción con cintas elásticas y resistentes.

Advertencias

- Como con cualquier otro equipo de protección respiratoria, el usuario debe ser formado en el uso correcto del equipo.
- Estas mascarillas no protegen frente a gases, vapores, disolventes de operaciones de pintura es spray o en atmósferas con deficiencia de oxígeno (< 19,5%).
- Utilizar únicamente en áreas adecuadamente ventiladas que contengan el suficiente oxígeno para mantener la vida.
- No utilizar cuando las concentraciones de los contaminantes sean inmediatamente peligrosas para la salud o la vida.
- Abandonar la zona inmediatamente si:
 - la respiración se hace difícil
 - se sienten mareos u otro malestar
- Deseche y reemplace la mascarilla si ésta ha sufrido algún daño, si la resistencia a la respiración se hace excesiva o al final de cada turno.
- Las mascarillas nunca deben alterarse o modificarse.
- Sólo para uso personal. NR: no reutilizable (uso de un turno) y no lavar.
- Para garantizar su efectividad, las mascarillas deben desecharse cada 6 horas.
- **Este dispositivo no es un producto sanitario en el sentido de la Directiva 93/42 o del Reglamento UE / 2017/745. ni un equipo de protección individual en el sentido del Reglamento UE / 2016 / 425.**

Materiales & Especificaciones

Material	Especificaciones	Tamaño
Mascarilla acabada	Mascarilla plana desechable	175 x 95
Capa exterior de tela no tejida	Polipropileno 25GRS	200mm de ancho
Capa intermedia de tejido no tejida	Filtro TNT 25GRS	180mm de ancho
Capa interior de tela no tejida	Polipropileno blanco 25GRS	210mm de ancho

Descripción	Material	Nombre técnico
Capa externa	Polipropileno 25GRS	Spunbond
Capa Media	Filtro TNT 25GRS	Meltblown
Capa Interna	Polipropileno blanco 25GRS	Spunbond
Alambre	Recubierto plástico Cal.24	Plastic Spooled
Elástico	Tejido algodón-Lycra	Lycra

Presentación

Caja de 50 unidades



Condiciones almacenaje

- Almacenar a temperatura ambiente
- Evite temperatura y humedad excesiva

Caducidad

2 años desde la fecha de fabricación




Instrucciones de Uso

Para ponerse la mascarilla

1. Lo primero es lavarse las manos con agua y jabón o gel desinfectante, siguiendo los pasos que marcan las autoridades sanitarias.
2. Partimos de la base de que la mascarilla estén bien, pero habría que revisarla previamente para comprobar que no tenga rasgadura o agujeros. Para ello, se sujeta por las gomas y se revisa a contraluz. Hecho esto, ya podríamos colocarla.
3. Importante: hay que asegurarse de que nos cubra bien, y ajustar la parte superior a la forma de nuestra nariz.

Para quitarse la mascarilla

1. Para quitarla hay que ir a los lados y no al centro. Para ello hay que sujetarla de nuevo por las gomas laterales y sacarla hacia delante asegurándose de que se mantiene alejada en todo momento de la ropa y de la cara por si hubiese alguna zona contaminada.
2. El último paso es tirarla a la basura y lavarse las manos.

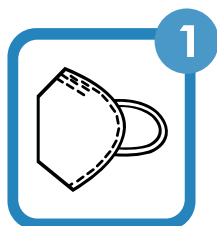


1 Para su correcta colocación mantenga la parte delantera de la mascarilla en la parte externa, y pase las tiras por detrás de las orejas para la sujeción de la mascarilla.



2 Ajuste bien la mascarilla a la cara hasta que esta cubra correctamente la nariz, boca y mejillas.



3 Finalmente, ajustar bien la mascarilla en la parte de la nariz haciendo presión en la zona de la sujeción de la varilla para que quede bien fija y adaptada a la forma de la nariz.

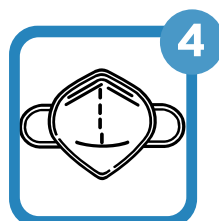

4 En caso de que la mascarilla esté dañada, huelo mal o este sucia, sustituir por una nueva inmediatamente.