




Apague el autoclave.

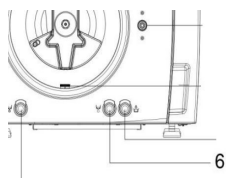


Vacíe el depósito de carga del autoclave, por la parte frontal inferior ( véase el manual de uso del autoclave) figura 6 del manual.




Cierre el grifo de entrada de agua de la red hídrica ubicado en la unidad mineralizadora.



Levante la tapa de la unidad de desmineralización y extraiga la llave para el ajuste / desmontaje de los recipientes que está ubicada en su interior.

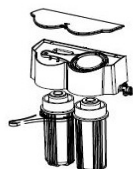


Quite los recipientes utilizando la llave ubicada debajo de la tapa de la de la unidad de desmineralización, vacíe el agua que queda en el interior de los recipientes y saque los cartuchos agotados, luego coloque los cartuchos nuevos.

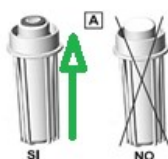

Quite la bolsa de protección de los cartuchos y póngalos en sus respectivos recipientes (junta de los cartuchos hacia arriba.)



Coloque los dos recipientes con los cartuchos debajo de sus cabezales de rosca que están fijados a la unidad desmineralizadora; luego, utilizando la llave suministrada con el aparato  atornille los recipientes en el sentido contrario a las agujas del reloj (con fuerza moderada)



Vuelva a colocar la llave en su lugar dentro de la unidad desmineralizadora y cierre la tapa que había levantado antes.