

CEMENTO DE RESINA AUTOADHESIVO

m-Zem Plus es un cemento de resina definitivo de curado dual, auto-adhesivo y auto-grabante. Está diseñado para ser usado fácilmente en un solo paso, es decir, la pieza a restaurar no tiene que ser tratada previamente con sistemas adhesivos, lo cual hace que el procedimiento pueda realizarse de forma rápida y fácil. Otras de sus características destacadas son su sencilla identificación, gracias a su alta radiopacidad, así como su fácil eliminación de residuos.

Indicaciones:

- Cementación definitiva de restauraciones de metal, cerámica o composites.
- Cementación de inlay, onlay, puentes, coronas y carillas.
- Cementación de postes y pernos (incluidos postes de fibra de vidrio).
- Cementación definitiva sobre aditamentos para implantes.

Características:


- Sistema de auto-mezcla.
- Autograbante y autoadhesivo.
- Mínimo grosor de la película.
- Fluidez ideal.
- Fácil eliminación de residuos.

Presentación:

- Jeringa de 8 g.
- 10 puntas de automezcla y 5 puntas intraorales.
- Colores A2 o TW.




Aplicación:

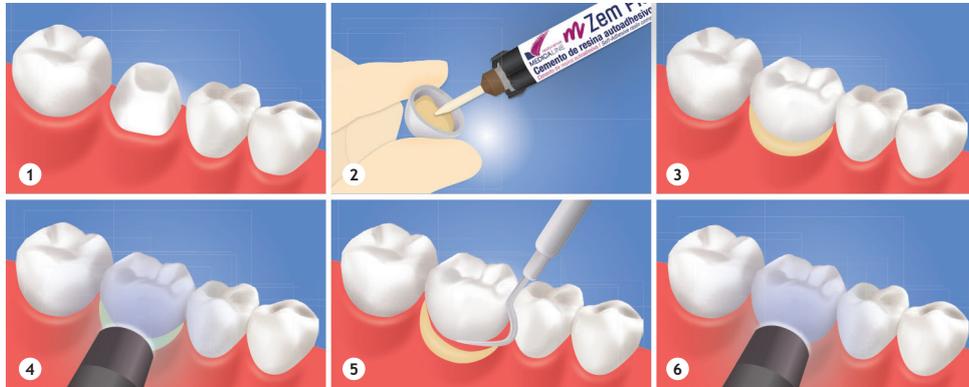

1. Extraer la restauración temporal, lavar abundantemente el pilar y secar.
2. Aplicar m-Zem Plus en la restauración.
3. Colocar la restauración en la pieza dentaria.
4. Fotopolimerizar el exceso de material durante 2-5 segundos.
5. Eliminar el exceso de material.
6. Fotopolimerizar todas las superficies durante 20 segundos. En caso de no aplicar lámpara de fotocurado, dejar el material polimerizar al menos 5 minutos.

Propiedades mecánicas:

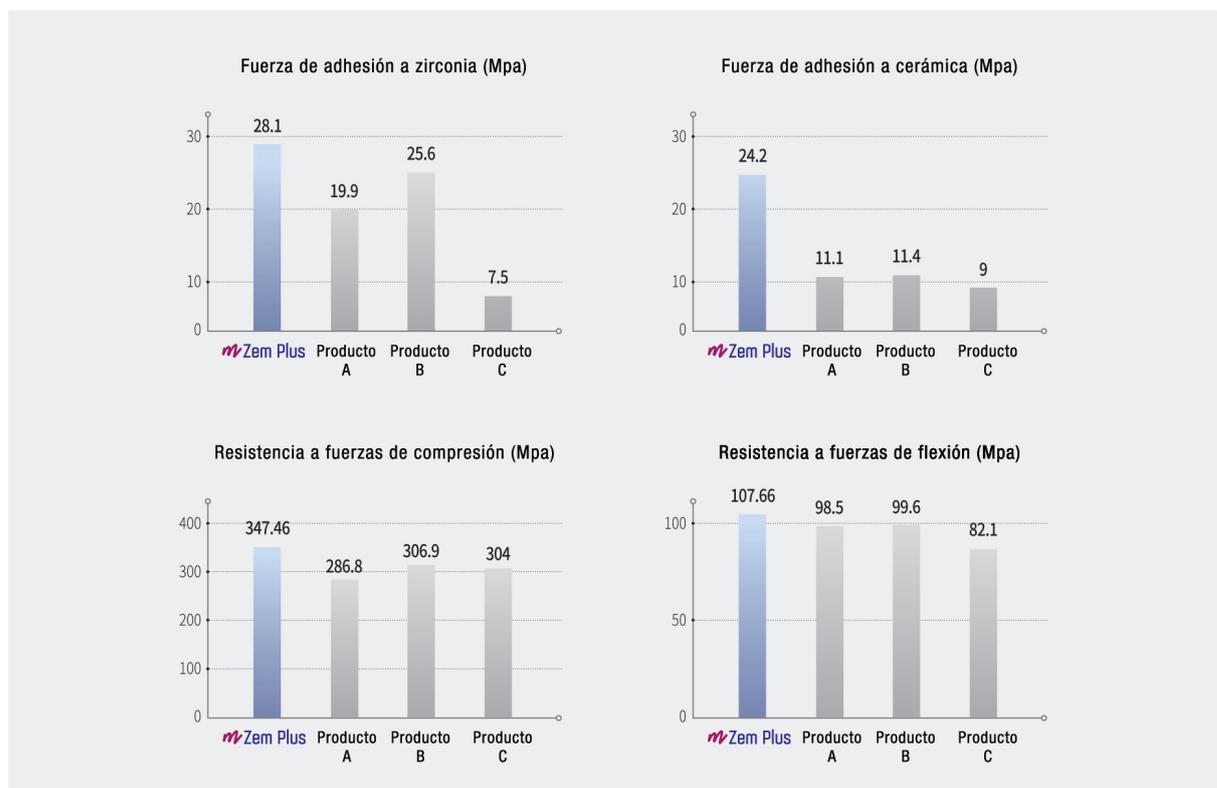

Cementación :

m-Zem Plus minimiza la posibilidad de errores y se aplica de forma simple. Usando puntas de automezcla se reduce el tiempo de aplicación. Adicionalmente, los endo tips hacen más fácil la aplicación en conductos radiculares.



Estética:

Para una estética natural, proveemos un tono universal A2, que es el más similar al color natural del diente, y el tono TW para restauraciones estéticas. m-Zem Plus tiene una estabilidad de color superior a otros productos.

A2



TW




DESPUÉS DE ESTAR EXPUESTO DURANTE
10 DÍAS EN CAFÉ A 35°C

mZem Plus

Producto
U

Producto
G

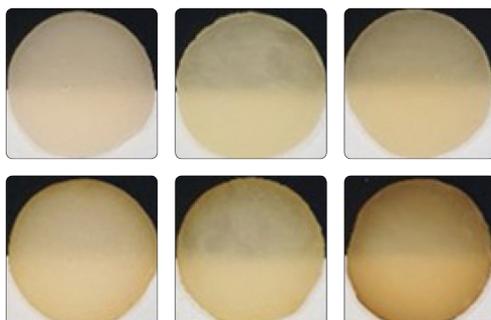

2 AÑOS DE EXPOSICIÓN EN
AGUA DESTILADA A 60°C

mZem Plus

Producto
U

Producto
G

