

MASCARILLA HIGIÉNICA REUTILIZABLE


UNE 0065:2020

Descripción

Mascarilla higiénica reutilizable conforme a la norma UNE0065:2020, fabricada con material TNT. Sujeción a la cabeza mediante dos bandas elásticas. Reduce el riesgo de contaminación e infección.

Características

- Talla recomendada para uso en adulto.
- Dimensiones 18x18 cm.
- Material del cuerpo de la mascarilla: Tejido no tejido TNT de 70 gr/m². 100% Polipropileno hidrófobo.
- Material de las bandas elásticas: 55% Poliéster / 45% Latex.
- Sujeción a la cabeza mediante dos bandas elásticas situadas en los dos extremos superior e inferior.

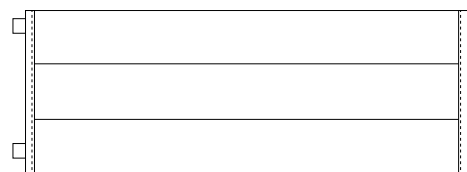

Advertencias

Este dispositivo no es un producto sanitario (PS) en el sentido de la Directiva 93/42 o del Reglamento UE/2017/745, ni un Equipo de Protección Individual (EPI) en el sentido del Reglamento UE/2016/425.

Criterios de aceptación para las mascarillas higiénicas reutilizables (usando los ensayos de la Norma UNE-EN 14683):

Aprobaciones

UNE 0065:2020 referente a Mascarillas higiénicas reutilizables.

La mascarilla puede aguantar al menos 10 ciclos de lavado a 60 °C (UNE-EN ISO 6330 programa 6N) y secado al aire (UNE-EN ISO 6330:2012, tipo A). y secado manteniendo sus prestaciones.

Ensayos	Criterios de aceptación
Eficacia de filtración. (%) (Ensayo BFE) Ensayada a través de ensayo de eficacia de filtración bacteriana (BFE), (%) (apartado 5.2.2 de la Norma UNE-EN 14683:2019+AC:2019)	≥ 90
Respirabilidad (Presión diferencial), (Pa/cm) (apartado 5.2.3 de la Norma UNE-EN 14683:2019+AC:2019)	> 60

Colocación de la mascarilla

Se recomienda colocar la mascarilla sobre la piel desnuda (es decir, sin la presencia de cabello en contacto con la piel del usuario y, para algunas personas, piel afeitada) y respetar los siguientes pasos:

1. Lavarse las manos con agua y jabón o frotarlas con una solución hidroalcohólica antes de manipular la mascarilla.
2. Identificar la parte superior de la mascarilla. Banda elástica más larga.
3. Posicionar la mascarilla en la cara, a la altura de la nariz.
4. Sostener la mascarilla desde el exterior y sujetar el arnés de cabeza detrás de la misma.
5. Bajar la parte inferior de la mascarilla a la barbilla.
6. Verificar que la mascarilla cubre la barbilla.
7. Verificar que la mascarilla está colocada correctamente. Para esto es necesario verificar el sellado y la ausencia de las molestias respiratorias.
8. Una vez ajustada, no tocar la mascarilla con las manos. Si el usuario necesita tocar la mascarilla, debe previamente lavarse las manos con agua y jabón o frotárselas con una solución hidroalcohólica.

Retirada de la mascarilla

Para evitar la contaminación al retirar una mascarilla, se deben seguir los siguientes pasos:

1. Quitarse los guantes de protección.
2. Lavarse las manos con agua y jabón o frotarlas con una solución hidroalcohólica.
3. Retirar la mascarilla sin tocar la parte frontal de la mascarilla.
4. Lavarse las manos con agua y jabón o frotarlas con una solución hidroalcohólica.

Lavado de la mascarilla

- Se debe realizar un ciclo completo de lavado (humedecer, lavar, enjuagar), con el detergente habitual, a una temperatura de lavado de 60°C.
- Se debe evitar el contacto entre una mascarilla sucia (a lavar) y la ropa limpia. La persona a cargo del lavado debe protegerse para manejar las mascarillas sucias.
- No se deben utilizar productos que puedan degradar o dañar los materiales y que disminuyan su capacidad protectora.
- Se recomienda que la mascarilla se seque completamente dentro de las 2 h posteriores al lavado. No se debe secar o higienizar con un horno microondas.
- Tanto durante el secado, como en el almacenaje posterior de la mascarilla, se deben evitar los ambientes en los que la mascarilla se pueda volver a contaminar.
- Después de cada ciclo de lavado, se debe realizar una inspección visual (con guantes de protección o manos lavadas). Si se detecta algún daño en la mascarilla (menor ajuste, deformación, desgaste, etc.), se debe desechar la mascarilla.

Eliminación de la mascarilla

Para reducir los riesgos del uso de estas mascarillas se debe eliminar una vez sobrepasado el número máximo de 10 ciclos de lavado.

Procedimiento para la eliminación

Las mascarillas se deben desechar en un contenedor provisto de una bolsa de plástico (preferiblemente con tapa y control no manual). Se recomienda utilizar doble bolsa para preservar el contenido de la primera bolsa en caso de desgarro de la bolsa exterior.

