

# Papacárie Duo

## Elimina las caries sin fresar

**Una gota de Papacárie** colocada sobre la caries, ablanda la lesión y permite despegarla de la dentina sana sin necesidad de usar turbina. **Papacárie sólo actúa sobre la caries, dejando intacta la parte sana\***.

En **30 segundos**, sin dolor ni sensibilidad y sin generar ningún tipo de aerosol, puede removerse la caries con una simple cureta. No es preciso el uso de elementos rotatorios ni anestesia.



\*"La Papaína actúa solamente en el tejido lesionado debido a la ausencia de una antiprotéasa plasmática, la alfa<sub>1</sub>-anti-tripsina, que impide su acción proteolítica en tejidos considerados normales" Papain Gel: A new Chemo-Mechanical Caries Removal Agent. Sandra Kalil et al. Journal of Clinical Pediatric Dent 30(20): 115-120, 2005

Más de 300 artículos científicos publicados

# Cómo usar Papacárie

**1.** Colocar la cantidad de gel (dependiendo del tamaño cavitario) sobre la loseta de vidrio o directamente sobre el guante.

**2.** Llenar la cavidad con PAPANACÁRIE y dejar que el producto actúe durante **30-60 segundos**.

**3. Remover la dentina cariada ablandada con la cureta**

(no es necesario una herramienta afilada). En caso de caries de gran tamaño puede realizarse una segunda aplicación hasta comprobar la ausencia de tejido infectado. La superficie debe aparecer brillante.

*Cuando no se altera la apariencia del gel significa que no hay más caries en descomposición.*

**4.** Una vez retirada la caries, limpiar la zona y rehabilitar de la forma habitual.

