

INSTRUCCIONES VIBRADOR DENTAL JT-51



Bienvenido a nuestros productos

Gracias por elegir nuestros productos.

Por favor revise las instrucciones antes de usar el producto para su segura operación.

El vibrador dental JT-51 es un vibrador de una gran potencia. El vibrador JT-28 tiene una alta eficiencia, su diseño único de la base de vibración hace que este pueda estar largo tiempo trabajando.

El equipo tiene 2 niveles, nivel débil y nivel fuerte, se puede cambiar según sea necesario.

Instrucciones de uso

Antes de encender el equipo, coloque el interruptor negro, el interruptor de los niveles en la parte central "O".

Con el interruptor negro en "O", encienda el equipo en el interruptor naranja (se encenderá la luz indicadora).

Elija luego el grado fuerte o débil en el interruptor negro.

Finalmente, gire la perilla de menor a mayor y el equipo empezará a funcionar.

Especificaciones

- Fuente de alimentación/frecuencia:
 - ① 220V , 50Hz +/-10%
 - ② 110V , 60Hz +/-10%
- Potencia : 150W
- Carga máxima : ≤4kg